

**Общество с ограниченной ответственностью «М.С.Корп»
(ООО «М.С.Корп»)**

Программное обеспечение «ВИЗЕРИТ»

Руководство по установке

© 2025 ООО «М.С.Корп»

Оглавление

Глава 1:	Описание.....	3
Глава 2:	Характеристики программного обеспечения	3
Глава 3:	Технические требования к установке и эксплуатации	3
Глава 4:	Инструкция по установке	3
Глава 5:	Начало работы	4

Глава 1: Описание

Программное обеспечение «ВИЗЕРИТ» предназначено для интраоральной рентгенографии и применяется для постановки диагноза и определения лечения заболеваний в области челюсти и полости рта.

Область применения: Стоматология.

Глава 2: Характеристики программного обеспечения

Технология разработки:

- Язык программирования: C#, JavaScript

Глава 3: Технические требования к установке и эксплуатации

- процессор: x64 не менее 2 ядер;
- операционная система: не ниже Windows 10 (64-bit);
- оперативная память – не менее 8 Гб;
- объем дискового хранилища – не менее 500 Гб;
- частота центрального процессора – не менее 1,8 ГГц;
- скорость сетевой карты – не менее 1000 Мбит/с;
- разрешение экрана монитора – не менее 1366 × 768 пикселей;
- порт USB2.0.

Глава 4: Инструкция по установке


Установка и настройка программного обеспечения производится самостоятельно. К работе с ПО допускаются лица, обладающие наличием опыта работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на уровне квалифицированного пользователя.


1. Скачать образ виртуальной машины с программным модулем по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/NolxoVQ1FhtCwA>. Для скачивания ввести пароль MmLFXB8U.

2. Распаковать на локальный диск архив VM-VM1.rar. Пароль 12345Zz.
3. Открыть приложение Hyper-V Manager.
4. В меню action выбрать import virtual machine.
5. Импортировать образ виртуальной машины из папки Virtual Mashines.

При первом запуске подождать загрузку сервера около 5 минут.

Глава 5: Начало работы

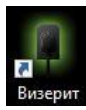

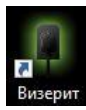1. На рабочем столе выбрать ярлык .
2. Далее выполнять действия, описанные в документе Руководство по эксплуатации.